

Betjening af funduskamera

1. Tænd computer og kamera
2. Både Emar og Imagenet skal være aktive.
3. Vælg patient, modul Extern og Imagenet OCT fastmap – Hent billeder.
4. Vælg mellem
 - AMD
 - Glaucom
 - Anterior
 - Fundus
5. Sæt pt tilrette og vejled om at fixere blikket.
6. Fokuser kamera i højre øje ved at samle de 2 runde hvide bolde.
7. Tryk på udløserknap på joystick
8. Flyt kamera til venstre øje og gentag 6 + 7.
9. Billederne gemmes ved at klikke på Close eller ?????